

Arbeitsanweisung: Benutzung des Notlaufkabels an der KARTSANA powerBRAVA und SILVER

1. Benötigte Teile:

- 1x Anschlussbuchse am Batteriekasten der Fahrtrage
(powerBRAVA – Batteriekasten am Fußende / Anschlussbuchse unterhalb)
(SILVER – Batteriekasten am Kopfende / Anschlussbuchse seitlich)
- 1x Steuerkabel mit Bedienteil, 7m

2. Produktbild



3. Benutzung

- a) Den 12-Volt-Anschlussstecker in die 12V Fahrzeugdose stecken.
- b) Blauen Stecker in die Anschlussbuchse der Fahrtrage stecken bis es einrastet.



- c) Nun kann die Trage über den Taster in beide Richtungen auf und ab gesteuert werden.

Hinweis: Geschwindigkeit ist reduziert. Funktion bis 200 kg Auflagegewicht ohne manuelles mithelfen zum Heben der Fahrtrage.



- d) Nach Benutzung des Notbediensystems die Entriegelung am blauen Anschlussstecker nach unten drücken und bei gehaltener Position im Uhrzeigersinn herausziehen.

